

使用条件：须放在比较坚硬的工作台上，以确保测量的准确度。

开机：连接好电源线，接通电源，显示屏将显示 **8888** ，初始化完成后体重窗口显示 **17:30** 表示时间。

注意：开机前请确保电源电压为 直流 12 V，秤盘上不能有任何重物。

测量：将婴儿放上秤盘既可显示重量，向上拉动挡板，平行移动到婴儿长度位置放下。按 **测量** 按键，等到体重数据稳定后，打印测量结果，结束测量。

去皮：在显示时间状态下按 **去皮** 按键，显示屏将显示 **----** ，当恢复显示时间状态后，去皮完成。

● 功能设定及调整：

所有功能设定及调整 是通过面板上的按键

(**+** **-** **选择** **确认** **取消**) 来操作。

主菜单介绍：主菜单有 14 项，在显示时间状态下，通过按 **+** 或 **-** 进入。主菜单代码的选择，范围是 1 - 14 。

日期调整：

选择菜单代码 **01** ，按 **确认** 进入调整状态。

身高窗口显示 **0603** 表示当前日期为 06 年 3 月，体重窗口显示 **24 5** 为 24 号星期五。闪烁显示的内容表示处于调整状态。

按 **+** 或 **-** 将显示数字调整到日期。

按 **选择** 循环改变需要调整的年，月，日，星期。

按 **确认** ，保存调整结果并退出。按 **取消** 不保存调整结果退出。

时间调整：

选择菜单代码 **02** ，按 **确认** 进入调整状态。

体重窗口显示 **17:05** 表示当前时间。闪烁的内容表示处于调整状态。

按 **+** 或 **-** 将显示数字调整到实际时间。

按 **选择** 循环改变需要调整的分钟，小时。

按 **确认** ，保存调整结果并退出。按 **取消** 不保存调整结果退出。

体重调整：

选择菜单代码 **03**，按 **确认** 进入调整状态。

身高窗口显示 **500** 表示当前修正值为 500，范围 1-999。体重窗口显示 **0.000** 为当前体重。在秤盘上放已知重量的物体。

体重显示稳定后按 **+** 或 **-** 将显示数字调整到实际值。

当需要重新测量时，可以按 **选择**。

按 **确认**，保存调整结果并退出。按 **取消** 不保存调整结果退出。

体重调整时显示分辨率为 0.001kg。调整结束时，注意观察修正值，如果到达范围极限，机器可能有故障。

身高调整:

选择菜单代码 **04**，按 **确认** 进入调整状态。

身高窗口显示 **00.0** 为当前长度。体重窗口显示 **1** 为当前修正值 1，范围 1-250。用已知长度测量。

按 **+** 或 **-** 将显示数字调整到实际值。

按 **确认**，保存调整结果并退出。按 **取消** 不保存调整结果退出。

身高调整时显示分辨率为 0.25cm。

打印设置:

选择菜单代码 **09**，按 **确认** 进入调整状态。

体重窗口显示 **2** 为当前打印参数，范围 0-3。当前参数 2 表示正常打印。0 为免打印，1 和 2 为正常打印，3 打印上一次的测量结果。

按 **+** 或 **-** 将显示数字调整到需要的数值。

按 **确认**，保存调整结果并退出。按 **取消** 不保存调整结果退出。

恢复出厂设置:

选择菜单代码 **12**，显示 **8888**。

按 **确认** 恢复出厂设置。按 **取消** 退出。

按 **确认** 或 **取消** 退出。

● 打印机的维护和换纸

本机采用热敏微型打印机，并采用面板式外壳。

1. 机头维护


为了确保打印机的正常工作，请不要随意拆卸打印机头。

- (1) 不要在打印机前盖板关闭时用力拽纸。
- (2) 更换纸卷时，注意机头上橡皮轮上是否有纸屑，如有请轻轻吹去。
- (3) 保持打印机线路板干净无尘土。


2. 安装纸卷

请务必按以下过程进行操作。

- (1) 按下面打印机上的 OPEN 按钮，打开打印机前盖板，如下图所示。

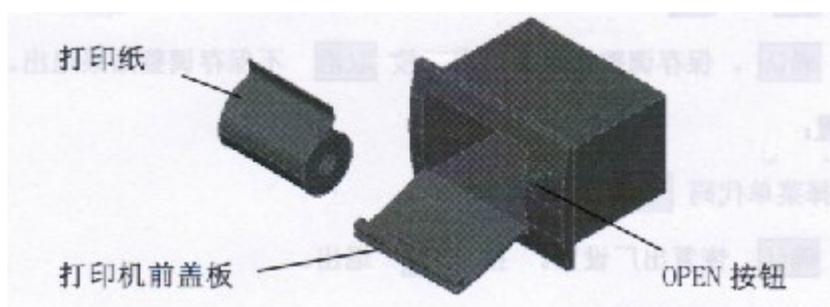

- (2) 将打印纸放入打印机内，拉开打印纸，合上打印机前盖板，使打印纸露出打印机出口一些。如下图所示

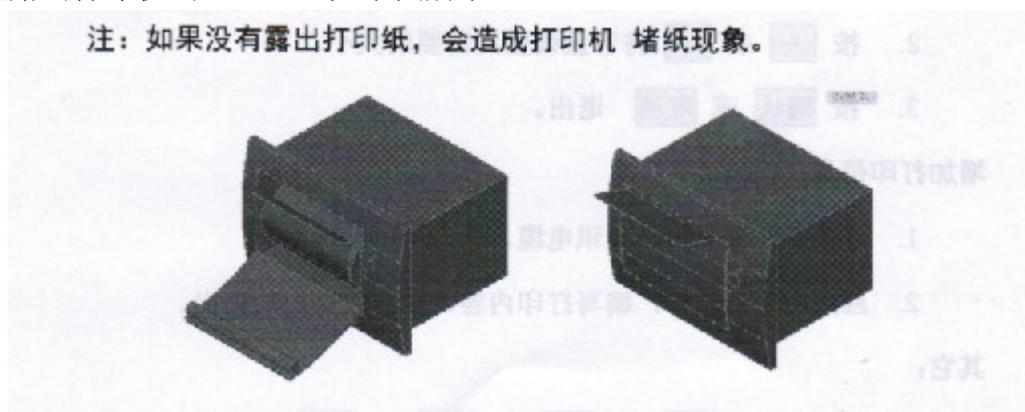

● 电气技术指标

体重测量范围：0.05-20kg	体重测量分辨率：0.01kg
体重测量精度：±0.02kg	
身高测量范围：30-78cm	身高测量分辨率：0.5cm

身高测量精度：±0.5cm

电源：DC 10-14V 50 W